

Elasticum®

Lifting par suspension



Le suspenseur Elasticum® a la caractéristique d'être souple, de consistance similaire aux tissus sous-cutanés. Implanté, il se comporte comme un ligament de suspension naturel.

Une alternative ou un complément au lifting facial classique

La réalisation d'un lifting sous suspension élastique permettra d'obtenir une action globale de la zone à traiter tout en limitant le décollement musculo-cutané .

L'action du suspenseur Elasticum® sera toujours musculaire afin d'obtenir un résultat durable. En complément d'un lifting traditionnel, il servira à renforcer l'action chirurgicale souvent déficiente en particulier sur la zone cervicale.

L'intervention se pratique sous anesthésie locale, en évitant ainsi le traumatisme chirurgical et anesthésique.

Description et composition du suspenseur Elasticum®

Il s'agit d'un fil de suture élastique, en silicone, revêtu de polyester, idéal pour la suspension et la traction des tissus.

Il est monté sur une aiguille atraumatique à doubles pointes biseautées qui permet d'implanter le suspenseur sans décollement important des tissus.

Les indications principales de pose du suspenseur Elasticum®

A chaque fois que le relâchement facial est modéré, et les injections d'acide hyaluronique sont inefficaces, l'utilisation du suspenseur Elasticum® trouve sa place.

Les zones susceptibles de bénéficier de ce traitement :

Zone Cervicale, afin de renforcer et de dessiner l'angle cervico-mandibulaire par une action sur le muscle platysma.

Zone jugale, par son action au niveau du SMAS, le suspenseur Elasticum® permettra un maintien musculaire pour redessiner harmonieusement la zone concernée. Une action cutanée sera nécessaire.

Zone temporale, l'implantation est réalisée à travers un simple point d'entrée sans décollement. La suspension sourcilière sera réalisée en quelques minutes pour un effet durable dans le temps.

Zone glutéale, par un double cerclage le suspenseur permettra de regalber les fesses Beatlacon. Un geste de filling modéré peut-être envisagé afin d'affiner le résultat. Cette indication est très avantageuse pour les patients dont les zones donneuses sont insuffisantes.



Référence	Désignation	Élasticité	Composition	Ø mm	Ø en traction cm	Longueur passive cm	Conditionnement
E3,5J1.3R115	ELASTICUM FACIAL	70%	Silicone élastomère + Polyester	0.67	0.42	50	4 unités
E3,5J1,5R165	ELASTICUM CERVICAL			0.67	0.42	50	2 unités
E4J1,5R115						75	4 unités
E5J2.0R350	ELASTICUM GLUTEAL			0.76	0.51	150	3 unités

